

QUICKGUIDE LUNA



**HUSK
ALTID AT SÆTTE
HÅNDBETJENING
I OPLADEREN
EFTER BRUG**



Batteri

- 100%
- 50 %.

● **SKAL SÆTTES TIL LADNING**

Lift op

Lift ned

Reset

Hvis lampe under **Reset** lyser, hold **Reset**-knap inde i 5 sek., for at liften igen kan køre.

Nødstop

Hvis der er trykket på den **røde STOP**-knap, skal **Reset** holdes inde i 5 sek. for at håndbetjeningen kan virke og oplade igen.




Nødfir

Anvendes, hvis **Lift op / Lift ned** ikke virker.

Hold **knap med faldskærm** nede under nedsækning, som påbegyndes efter 5 sek. Liften bipper konstant, når knappen holdes nede.

Hvis nødfir på håndbetjening ikke virker, benyttes det mekaniske nedfir således:

- ① Tag nøglen fra ladestation.
- ② Fjern stik til håndbetjening fra Luna.
- ③ Fjern prop i siden af Luna.
- ④ Stik nøglen i hullet på siden af Luna.
- ⑤ Drej nøglen ind til krog med åg er i ønsket position.

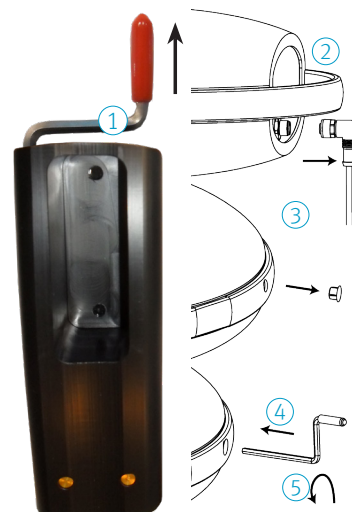

Håndbetjeningen skal altid være tilsluttet, for at liften virker.



Scan QR-koden for yderligere informationer






SWL 275 kg

WIN CARE


QUICKGUIDE LUNA

Nedtagning af lift med stang

1. Sænk liften ned i holderen på Luna bordet
2. Hold stroppen stram
3. Pres stangen ind nederst på låsen (se skitse A)
4. Pres stangen op ad mod låsen (se skitse B)
5. Løft låsen af kroen (se skitse C)
6. Når stroppen køres ind på plads, skal den altid holdes stramt.
Lad evt. låsen
7. sidde på stangen, så den er klar til næste værelse.

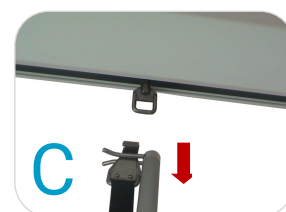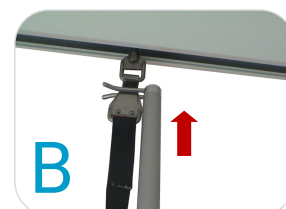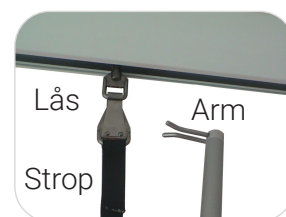

Rum-til-rum med en Luna

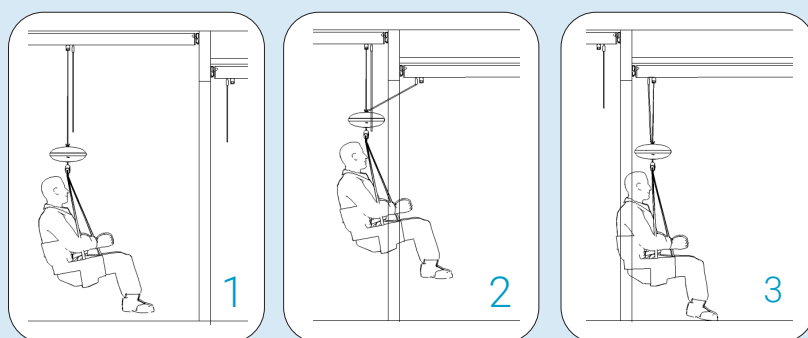

VIGTIGT

Sørg for at holde en sikker afstand mellem brugerens hoved og loftliften, inkl. strop under løft.

Sæt altid liften til opladning efter brug. Håndbetjeningen skal altid være tilsluttet, for at liften virker.

1. Luna og kørevogn i tilstødende rum placeres så tæt på døråbning som muligt.
2. Overførselsstroppen fra tilstødende rum kobles til det ledige bøjlebeslag på Luna. Stroppen slækkes langsomt ind til overførselsstroppen bærer brugerens vægt.
3. Den løse strop kan nu afmonteres og bør hænges op således at den ikke kommer i vejen for den videre forflytning.