


# DISPOSITIVI DI CONTENZIONE E MANTENIMENTO DELLE PERSONE A LETTO

I dispositivi di contenzione a letto WINN'SAVE®, forniti dietro prescrizione medica, sono stati appositamente progettati per limitare la libertà di movimento delle persone con facoltà psichiatriche alterate al fine di impedire il rischio di caduta, limitare i periodi di deambulazione o permettere la somministrazione di un trattamento.

- **Efficacia:** Progettazione evolutiva a seconda del livello di protezione aspettato.  
Tessuto rassicurante grazie ad una percezione morbida al tocco.  
Uso facilitato mediante marcature integrate.  
Rinforzo delle cuciture sottoposte alle trazioni.  
Durabilità dei materiali (Fibbie e occhielli inossidabili)
- **Sicurezza:** Tessuti trattati «Fuoco Ritardante».  
Compatibilità con una disinfezione termica e chimica.  
Due sistemi di chiusura a seconda delle necessità (Contenzione – magnetica o mantenimento – fibbia).

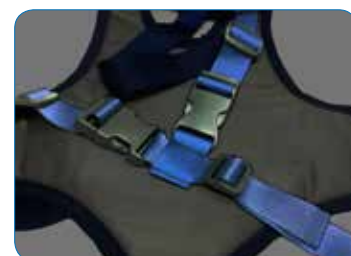

## Contenzione e mantenimento a letto

### • Attacco addominale + mantenimento pelvico

**Indicazioni:** agitazione media con rischio di caduta.

**Proprietà:** Contenzione della persona allettata. Permette di muovere le braccia e le gambe, sedersi e girarsi nel letto.

Grazie al mantenimento pelvico, il paziente non potrà scivolare verso il basso.

**Consigli per l'uso:** Attaccare alle parti fisse del letto.

Misura il girovita prima di ordinare il vostro prodotto.

**Composizione:** Materia in poliestere. Trattato non fuoco.

**Raccomandazioni:** La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati ogni 24 ore.



### • Attacco 2 polsi (fissaggio alla cintura addominale)

**Indicazioni:** Agitazione severa con rischio di caduta. Agitazione e/o aggressività fisica non controllabile.

**Proprietà:** Contenzione della persona allettata mediante attacchi dei polsi con possibilità di aggiustare la lunghezza per ridurre l'ampiezza dei movimenti del braccio.

**Consigli per l'uso :** L'attacco 2 polsi si usa in aggiunta dell'attacco addominale con mantenimento pelvico. Si fissa alla cintura addominale.

Taglia unica.

**Composizione:** Materia in poliestere. Trattato non fuoco.

**Raccomandazioni:** La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati ogni 24 ore.



### • Attacco 2 polsi alle parti fisse del letto.

**Indicazioni:** Agitazione severa con rischio di caduta. Agitazione e/o aggressività fisica non controllabile.

**Proprietà:** Contenzione della persona allettata mediante attacchi dei polsi con possibilità di aggiustare la lunghezza per ridurre l'ampiezza dei movimenti del braccio.

**Consigli per l'uso:** Attaccare alle parti fisse del letto.

Disponibile in taglia unica (giropolso da 5 cm minimo a 40 cm massimo).

**Composizione:** Materia in poliestere. Trattato non fuoco.

**Raccomandazioni:** La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati ogni 24 ore.



### • Attacco spalle e torace

**Indicazioni:** Agitazione media con rischio di caduta.

**Proprietà:** Contenzione della persona allettata.

**Consigli per l'uso:** L'attacco spalle e torace si usa in aggiunta dell'attacco addominale con mantenimento pelvico.

Misurare la parte spalle torace prima di ordinare il vostro prodotto.

Possibilità di aggiungere un accessorio – prolunga per attacchi spalle e torace.

**Composizione:** Materia in poliestere. Trattato non fuoco.

**Raccomandazioni:** La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati ogni 24 ore.



### • Attacchi universali

**Indicazioni:** Agitazione severa con rischio di caduta. Agitazione e/o aggressività fisica non controllabile.

**Consigli per l'uso :** Disponibile in taglia unica.

**Composizione:** Materia in poliestere. Trattato non fuoco.

**Raccomandazioni:** La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati ogni 24 ore.



RIF.	DESCRIZIONE	MISURE	SISTEMI DI CHIUSURA	
			MAGNETICA	FIBBIA SCORREVOLE
VCBTLT002-10	Contenzione addominale e pelvica a letto con attacchi laterali - (S)	45 - 85 cm*	x	
VCBTLT002-20	Contenzione addominale e pelvica a letto con attacchi laterali - (M)	70 - 118 cm	x	
VCBTLT002-21	Contenzione addominale e pelvica a letto senza attacchi laterali - (M)	70 - 118 cm	x	
VCBTLT002-30	Contenzione addominale e pelvica a letto con attacchi laterali - (L)	94 - 158 cm	x	
VCBTLT002-31	Contenzione addominale e pelvica a letto senza attacchi laterali - (L)	94 - 158 cm	x	
VCBTLT003-01	Opzione Traversa di letto per attacca-caviglie	-	x	
VCBTLT004-01	Prolunga cinghia toracica	-	x	
VCBTLT004-20	Contenzione cinghia toracica - (M)	20 - 50 cm	x	
VCBTLT006-00	Contenzione Attacchi universali polsi e caviglie (x2)	5 - 40 cm**	x	
VCBTLT011-00	Contenzione Attacchi 2 polsi taglia unica (x2)	10 - 30 cm	x	
VCNTLT007-00	Mantenimento Universale a Fibbia (x2)	5 - 40 cm**		x
VCBTLT010-10	Mantenimento addominale (Fibbie, Velcro) - (S)	45 - 85 cm		x
VCBTLT010-20	Mantenimento addominale (Fibbie, Velcro) - (M)	65 - 85 cm		x
VCBTLT010-30	Mantenimento addominale (Fibbie, Velcro) - (L)	85 - 120 cm		x



\*Misura corrispondente al girovita

\*\*Misura corrispondente al girocaviglia e al giropolso

Garanzia 1 anno

Manutenzione: 95° CL 5000ppm

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 - Francia  
Tel: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail: contact@askle.com

www.winnicare.fr



WINNOCARE  
g r o u p e

by

ASKLÉSANTÉ

Spinta da un costante impegno di migliorare i propri prodotti,  
ASKLÉ SANTÉ si riserva la facoltà di modificarne, senza preavviso, le caratteristiche tecniche – fotografie non contrattuali.