



# ALMOFADA ALOVA® PERFILADO

Tudo o que precisa, agora tem com  
ALOVA®



**PREOCUPAMO-NOS COM AS PESSOAS**  
COM PERDA DE AUTONOMIA E DOS SEUS CUIDADORES

EXPERIÊNCIA DE PRODUTO

SOLUÇÕES TERAPÊUTICAS

EXPERIÊNCIA DE SERVIÇO



WIN  CARE

## PORQUÊ ESCOLHER A ALMOFADA ALOVA®?

Feito de material viscoelástico com memória (80 kg/m<sup>3</sup>) que promove uma distribuição correcta da pressão quando se senta.

Disponível em 24 tamanhos e 3 alturas para adaptar-se a todas as necessidades e adaptar-se à cadeira.

Disponível com 2 fundas de PU, com superfície inferior antiderrapante.

Ajuda a reduzir uma grande percentagem da pressão exercida pelo corpo quando sentado durante longos períodos de tempo.

A superfície inclinada permite que o cóccix adquira uma postura muito mais relaxada.

- Ajuda a **prevenir úlceras de pressão** em doentes de risco **MÉDIO** ou **ALTO**.
- Prevenção reforçada de úlceras de pressão isquial e coccígea.
- Melhor adaptação à morfologia dos utilizadores e ao seu ambiente material.

- A inclinação da almofada evita que o utilizador deslize para a frente.
- A almofada de 6 cm de espessura é adequada para uma carga máxima de 90 kg.
- Superfície anatômica e muito confortável.




## ALOVA, A nova gama high-end de ALMOFADAS CURVAS VISCOELÁSTICAS

- Conforto .
- Abdução de anca .
- Rotadores externos



- Prevenção de úlceras sacro-coccígeas de decúbito.
- Descarga de cóccix.

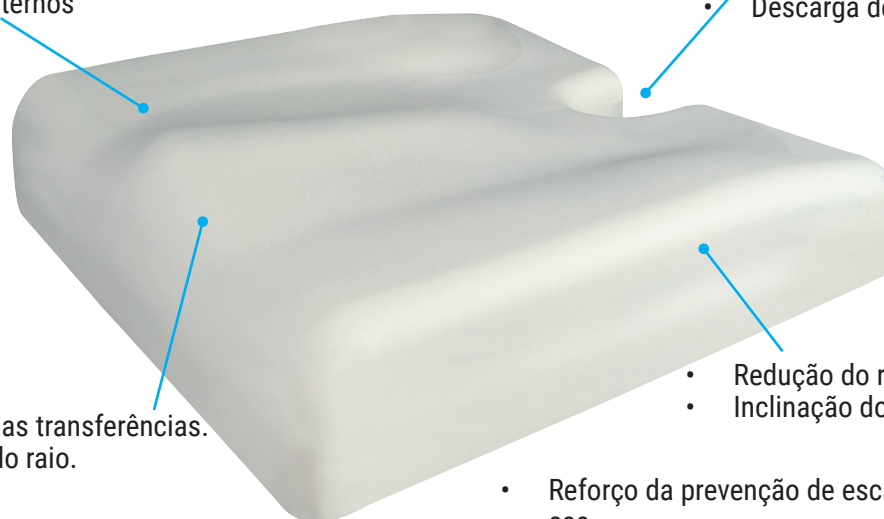


- Melhoria das transferências.
- Aumento do raio.

- Redução do risco de queda.
- Inclinação do assento.

- Reforço da prevenção de escaras isquiáticas.
- Espessura > 6 cm.



Mapeamento de valores de distribuição de pressão para um doente de 172 cm e 80 kg.

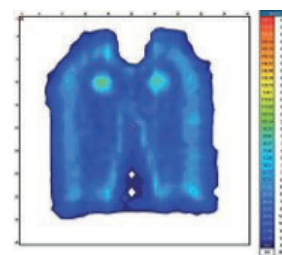

O formato de 43 x 43 cm com uma inclinação feita de espuma viscoelástica adapta-se à forma do seu corpo sem deformar. Com materiais termo-reguladores, ajusta-se às alterações climáticas.

### TAMANHO

Tamanho impresso na almofada

## ALMOFADA PERFILADA ALOVA com batente pélvico



O batente pélvico trava o deslizamento para a frente. Altura >8 cm.

- Ao seleccionar uma **almofada ALOVA®** com batente pélvico, é muito importante ter em conta o sexo e o peso do utilizador.
- Se o utilizador for homem, devido à sua construção, recomenda-se seleccionar uma almofada com uma maior profundidade para que o utilizador se sinta confortável.
- Para as mulheres, isto não é tão importante e a selecção deve ser feita de acordo com o peso.



## ALMOFADA ALOVA® XXL

Espuma biestruturada de 9 cm de espessura.



Manutenção: coberturas de PU Promust











O material viscoelástico com memória (80 kg/m<sup>3</sup>) de ALOVA®, favorece a imersão das partes do corpo em contacto com o suporte, para reduzir os valores máximos de pressão.  
valores máximos de pressão.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	LARGURA (cm)	COMPRIMENTO (cm)	ALTURA (cm) Min. / Max.*	PESO PACIENTE Kg	CAPA	PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
<b>ALOVA® Ergonómico</b>	VCAE/M4343	43	43	9	30 a 100	Protecção total em PU Promust (tecido elástico revestido com poliuretano) em preto na parte superior e cinzento na parte inferior e nos lados. Parte inferior antidesslizante em tecido PU/PVC  <b>As almofadas são fornecidas com duas capas.</b>	EN 597-1 EN 597-2
<b>ALOVA® PERFIS PADRÃO</b>	VCAG3636	36	36	6 / 9	20 a 80		
<b>ALOVA® Perfilagem de vários tamanhos</b>	VCAG4343	43	43	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4340	43	40	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4540	45	40	6 / 9	30 a 120		
	VCAG3841	38	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4041	40	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4341	43	41	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4043	40	43	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4544	45	44	6 / 9	30 a 120		
	VCAG5044	50	44	6 / 9	30 a 135		
	VCAG4347	43	47	6 / 9	30 a 120		
<b>ALOVA®</b> Perfilagem de vários tamanhos XL	VCAG4343XL	43	43	9 / 12	30 a 110		
<b>ALOVA®</b> Perfilagem de vários tamanhos XXL	VCAG5044XL	50	44	9 / 12	30 a 135		
	VCAG5250	52	50	7 / 10	120 a 160		
	VCAG5450	54	50	7 / 10	120 a 160		
	VCAG5650	56	50	7 / 10	120 a 200		
<b>ALOVA®</b> Perfilação Batente pélvico	VCAG6050	60	50	7 / 10	120 a 200		
	VCAG3841BP	38	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4041BP	40	41	6 / 9	20 a 80		
	VCAG4341BP	43	41	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4343BP	43	43	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4544BP	45	44	6 / 9	30 a 120		
	VCAG5044BP	50	44	6 / 9	30 a 135		
VCAG4347BP	43	47	6 / 9	30 a 120			

\* Altura mínima = Altura da almofada no fundo do perfil / Altura máxima = Altura total da almofada.  
 Cobertura protectora compatível com produtos desinfectantes e detergentes hospitalares.



<b>Material da almofada</b>	<b>Visco-elástica</b>
<b>Densidade HR</b>	<b>80 Kg/m3</b>
<b>Peso do utilizador</b>	<b>20 - 200 Kgs</b>
<b>Alturas</b>	<b>6-9 // 7-10 // 9-12</b>
<b>Risco de escaras</b>	<b>Moderado a alto</b>
<b>Descarga de cóccix</b>	<b>SIM</b>
<b>Material da funda</b>	<b>PU 30 % / poliéster 70 % y superficie inferior antiderrapante</b>
<b>Lavagem de coberturas</b>	<b>Lavagem moderada até 90 °C</b>
<b>Tamanhos</b>	<b>24 Tamanhos</b>
<b>Batente pélvico</b>	<b>Moldado em Almofada + capa</b>
<b>Forma anatómica</b>	<b>SIM</b>
<b>Capa com salto</b>	<b>SIM</b>



**WinnCare Spain**

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: [ventas@winnCare.es](mailto:ventas@winnCare.es)

Web: [winnCare.com](http://winnCare.com)

Blog: [wearewinnCare.com](http://wearewinnCare.com)



@winncarespain

