



## UNIVERSAL COMFORT med hovedstøtte

Polstret helsejæl med ekstra støtte omkring lår og bækken.

### ANVENDELSE

- Til brugere med øget funktionsnedsættelse eller ved andre specielle behov.
- Sejlet med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.
- Til forflytninger fra siddende og liggende stilling.
- Til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

### EGENSKABER

- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol eller i liggende stilling fra seng eller badeleje.
- Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, hvilket giver brugeren en følelse af tryk ved forflytningen.
- Sejlet har delte benstropper med speciel strop-løsning, som gør, at stropperne ikke skal krydses. Benstropperne har en stor polstret overfalde, som letter pres-set på hele lårbenet.
- Sejlet giver brugeren en opretsiddende stilling, der medvirker til en korrekt positionering af brugeren.
- Sejlet har en lille sædeåbning.
- Sejl i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.



### SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

#### Materiale:

Fås i polyester og polyester net.

**Størrelser:** XS-S-M-L-XL-XXL

#### VARENUMRE:

Universal Comfort med hovedstøtte, polyester:

	Varenr.	HMI-nr.
<b>XS</b>	009-09763	84950
<b>S</b>	009-09764	84952
<b>M</b>	009-09765	84955
<b>L</b>	009-09766	84957
<b>XL</b>	009-09767	84958
<b>XXL</b>	009-09768	84959

Universal Comfort med hovedstøtte, polyester net.


	Varenr.	HMI-nr.
<b>XS</b>	009-09773	84960
<b>S</b>	009-09774	84961
<b>M</b>	009-09775	84962
<b>L</b>	009-09776	84965
<b>XL</b>	009-09777	84963
<b>XXL</b>	009-09778	84964

## STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:

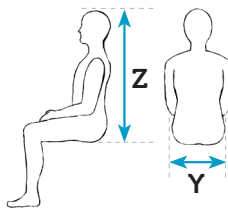

	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Y</b> (hoftemål)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
<b>Z</b> (mål fra hoved til bagdel)	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm

### TIP!

Ved at lægge benstropperne over hinanden, kan Comfort-sejlet bruges som amputationssejl:



For yderligere specifikationer, kontakt [salg@winncaare.dk](mailto:salg@winncaare.dk). Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncaare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst [salg@winncaare.dk](mailto:salg@winncaare.dk) for mere info herom.

## KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

[winncaare.com](http://winncaare.com)

E-mail: [info@winncaare.dk](mailto:info@winncaare.dk)

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE