



COMFORT ENGANGSSEJL

Non-woven engangs-helsej. Fås med eller uden hovedstøtte.

ANVENDELSE

- Engangssejlet vælges, når der kræves ekstra høj hygiejnstandard, fx ved risiko for smitte eller infektion.
- Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.
- Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.
- Anvendes til forflytninger i mobile og stationære personløftere.
- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol eller i liggende stilling fra seng.

EGENSKABER

- Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryk ved forflytningen.
- Benstropperne har en stor behagelig overflade, som letter presset på hele lårbenet.
- Sejlet giver brugeren en opretsiddende stilling, der medvirker til en korrekt positionering af brugeren.
- Sejlet er lavet i non-woven materiale.
- Fås med eller uden hovedstøtte.

SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale: PP, Non-woven

Størrelser: S-M-L-XL

Fås med og uden hovedstøtte

VARENUMRE

Universal Comfort Engangssejl uden hovedstøtte (kasse med 10 stk.)

	Varenr.	HMI-nr.
S	008-04104	110056
M	008-04105	110059
L	008-04106	110062
XL	008-04107	127840

Universal Comfort Engangssejl med hovedstøtte (kasse med 10 stk.)

	Varenr.	HMI-nr.
S	008-04114	110065
M	008-04115	110068
L	008-04116	110071
XL	009-04117	127843




PRODUKT HIGHLIGHTS

- Delte benstropper med speciel stropløsning, som gør, at benstropperne ikke skal krydses.
- Lille sædeåbning.
- Et vaskesymbol med farveindikator, der advarer, hvis sejlet er blevet for fugtigt/vådt og derfor skal udskiftes:



- Farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen, samt markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen. Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen. Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse M (Medium):

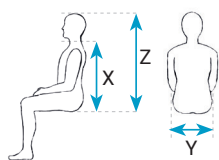

	S	M	L	XL
Y (hoftemål)	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm
X (uden hovedstøtte (mål fra nakken til bagdel))	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm
Z (med hovedstøtte (mål fra hoved til bagdel))	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winnicare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winnicare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winnicare.dk for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winnicare.com

E-mail: info@winnicare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE