



LITS
MÉDICALISÉS

BREVETÉ

GAMME X'PRESS



Dispositifs médicaux de classe 1

Avec X'PRESS® améliorez le quotidien de vos équipes, préservez le confort des patients, optimisez l'ergonomie pour les soignants

EXPERTISE PRODUITS

SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES

EXPERTISE SERVICES



WIN  CARE



GAMME X'PRESS

La **GAMME X'PRESS** a été co-conçue avec des techniciens-installateurs afin de diminuer le risque de Troubles musculo-squelettiques tout en gardant le souci de la prise en charge de patients ayant perdu leur autonomie motrice ainsi que du bien-être des soignants et aidants.



Stockage optimisé

- ▶ Encombrement réduit dans l'entrepôt
- ▶ Accessoires disponibles sur le lit



Montage & démontage simplifiés

Ergonomie et intuitivité lors de l'installation



Transport & Livraison facilité

- ▶ Optimisation de rangement dans les véhicules
- ▶ Accès facilité au domicile des patients (ascenseurs, couloirs)
- ▶ Pensé pour être livré et monté par 1 seule personne



Nettoyage & Désinfection sécurisés

- ▶ Un accès facilité de toutes les zones à traiter.
- ▶ Un lit vertical pour faciliter l'écoulement naturel des liquides



X'PRESS



- ▶ Version pour les personnes en perte d'autonomie



X'PRESS LOW



- ▶ Version basse pour les personnes désorientées



X'PRESS XXL



- ▶ Version bariatrique pour les personnes jusqu'à 270kg

TÉMOIGNAGE CLIENT



«Cela fait maintenant 10 ans que j'ai décidé d'équiper l'intégralité de mon parc de 150 lits avec des lits X'PRESS car c'est pour moi le meilleur choix pour le confort du patient et les aidants, ergonomique pour mes équipes et économique pour mes finances».

Dominique PEUCELLE, Gérant de PROXIMED en Loire-Atlantique.



PRÉVENIR LE RISQUE DE TMS*

L'ergonomie mécanique du lit permet à l'installateur de respecter les postures recommandées pour prévenir les TMS durant les opérations de livraison, de montage et démontage du lit.

Son encombrement réduit ainsi que son stockage sur ses propres roues facilitent les déplacements dans toutes les situations (ascenseurs, petits véhicules ...).

*Troubles musculo-squelettiques

Un montage et un démontage ergonomiques, **intuitifs**, pouvant être effectué par **1 personne seule**, et identiques aux 3 lits

1



Le **CHARIOT** de transport devient le **CHÂSSIS** du lit

2



Brancher le lit sur le secteur et monter le croisillon à son maximum

3



Les 1/2 sommiers pied et tête se positionnent en bout des croisillons

4



Basculer le 1/2 sommier tête et faire coulisser le 1/2 sommier pieds afin d'assembler le sommier

5



Mise en place des accessoires

RETROUVEZ NOS TUTORIELS VIDÉOS



▶ Montage du lit **X'PRESS**



▶ Démontage du lit **X'PRESS**

Le lit **X'PRESS 90** s'adapte à tous les types de chargements et donc à **différents véhicules**

kit de chargement latéral

Réf : A626-00



kit de chargement à plat

Réf : A627-00





BREVETÉ
N° FR2930878



X'PRESS

Le lit **X'PRESS** est adapté à la prise en charge des personnes allongées ayant perdu leur autonomie motrice. Cette perte d'autonomie peut être transitoire ou définitive.

 jusqu'à 135kg



LE + PRODUIT

LA GAMME S.A.M

Il s'agit d'accessoires de lit offrant de nouvelles fonctionnalités pour favoriser la mobilité des personnes soignées tout en réduisant et facilitant les interventions des soignants ou des aidants.



DE SÉRIE



Sommier divisible



Télécommande rétroéclairée à verrouillage total



Prise d'équipotentialité



Roues avec freins Individuels



Compatible avec la gamme S.A.M



34 à 84 cm



Jusqu'à 74°

OPTIONS



Relève-buste électrique à translation



Relève-jambes électrique avec plicature



Télécommande Infrarouge



Télécommande à Verrouillage sélectif



Panneaux sonores NEWEE®



Mécanique, électrique et télécommande



Panneaux et accessoires



Prise en charge LPPR

- Lit médical, lit standard, location hebdomadaire, lit et accessoires CODE 1241763, tarif 12.60 € TTC (prix unitaire réglementé).
- Les fonctions proclive et déclive sont impossibles à domicile, ou sous conditions précises si elles existent.
- Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.



BREVETÉ
N° FR2930878



X'PRESS LOW

Le lit **X'PRESS LOW** est adapté à la prise en charge des personnes allongées ayant perdu leur autonomie motrice. Cette perte d'autonomie peut être transitoire ou définitive.

Il a pour but de préserver l'autonomie résiduelle des personnes âgées ayant une fragilité cognitive, en agissant sur :

- ▶ diminution de la gravité des chutes
- ▶ la réduction de l'usage des contentions au lit (physiques, chimiques, psychologiques)

 **jusqu'à 135kg**



LE + PRODUIT

AMPLITUDE

Le lit X'PRESS Low bénéficie d'une amplitude variable allant de 24 à 80 cm qui permet de :

- ▶ Faciliter les entrées et sorties de lit des patients, et ainsi diminuer le risque de chutes
- ▶ S'adapter à toutes les tailles de soignants et d'aidants pour améliorer l'ergonomie lors de la pratique des soins



DE SÉRIE



Sommier divisible



Télécommande rétroéclairée à verrouillage total



Prise d'équipotentialité



Roues avec freins individuels



Compatible avec la gamme S.A.M.



24 à 80 cm



Jusqu'à 70°

OPTIONS



Relève-buste électrique à translation



Relève-jambes électrique avec plicature



Relève-jambes électrique



Télécommande Infrarouge



Télécommande à Verrouillage sélectif



Panneaux sonore NEWEE®



Mécanique, électrique et télécommande



Panneaux et accessoires



X'PRESS XXL

Le lit X'PRESS XXL est adapté à la prise en charge des patients de plus de **135 kg** jusqu'à **270 kg** qui présentent une perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive

 **de 135 à 270 kg**




LES + PRODUIT

Télécommande rétroéclairée et verrouillable de série

- ▶ Rétroéclairage lorsque vous l'utilisez dans des conditions de faible luminosité
- ▶ Verrouillage lorsqu'il existe un risque pour la personne soignée lié à l'activation de fonctionnalités du lit



DE SÉRIE

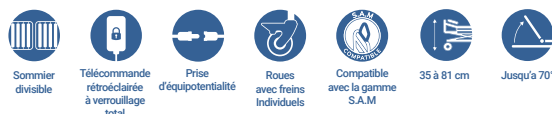

OPTIONS



Mécanique, électrique et télécommande



Panneaux et accessoires



Prise en charge LPPR

- Lit médical, lit + 135 kg, location hebdomadaire, lit et accessoires (un seul sommier de largeur minimale de 110 cm; charge limite minimal du patient : 200 kg) CODE 1249523, tarif 24.00 € TTC (prix unitaire réglementé). Le poids du patient doit être précisé sur la prescription médicale.
- Les fonctions proclive et déclive sont impossibles à domicile, ou sous conditions précises si elles existent.
- Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



X'PRESS

POUR LES PERSONNES
EN PERTE D'AUTONOMIE

| Désignation | X'PRESS |
|--------------------------------|---|
| Référence | Pack XO3 |
| Sommier | 90 cm x 200 cm |
| Dimension en position stockage | 50 cm de large, 90 cm de long et 160 cm de haut |
| Amplitude de hauteur variable | 34 à 84 cm |
| Relève-jambes | Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version R : 13,5° électrique Version P : plicature des genoux 26° et 16° réglage des pieds par crémaillère |
| Capacité levage | Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg |
| Roues | Ø 100 mm freinage individuel |
| Motorisation | LINAK - Télécommande verrouillable et rétro-éclairée Indice de protection IP66 (CEI 60529) |



X'PRESS LOW

POUR LES PERSONNES
DÉSORIENTÉES

| Désignation | X'PRESS Low |
|-------------------------------|--|
| Référence | Pack AG1 |
| Sommier | 90 cm x 200 cm |
| Amplitude de hauteur variable | 24 à 80 cm |
| Relève-jambes | Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version P : inclinaison de 21° maximum électrique et plicature des genoux par crémaillère de 26° maximum |
| Capacité levage | Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 kg / Accessoires 15 kg / Matelas 20 kg |
| Roues | Ø 100 mm freinage individuel |
| Motorisation | LINAK - Télécommande verrouillable et rétro-éclairée Indice de protection IP66 (CEI 60529) |



X'PRESS XXL

POUR LES PERSONNES
JUSQU'À 270 KG

| Désignation | XXL X'PRESS |
|-------------------------------|---|
| Référence | Pack XA1 |
| Sommier | 120 cm x 200 cm / 140 cm x 200 cm |
| Amplitude de hauteur variable | 35 à 81 cm |
| Relève-jambes | Version C : inclinaison de 15° maximum par crémaillère Version P : Plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère |
| Capacité levage | Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maximum 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg |
| Roues | Ø 100 mm freinage individuel |
| Motorisation | LINAK - Télécommande verrouillable et rétro-éclairée Indice de protection IP66 (CEI 60529) |

WinnCare est le seul fabricant à pouvoir vous garantir une offre **Lit/Matelas** conforme aux plus hauts standards de marché avec un tarif compétitif.



Fabriqués dans nos 2 usines de Nîmes et Miniac Morvan, nos matelas monobloc moulés combinent les plus hauts standards d'**exigence** en termes de **qualité**.

Dimension de couchage 90 x 200 cm



ALOVA
VMA63

| Technicité & Ergonomie



Un concentré de technicité pour répondre aux besoins cliniques de chaque patient :

- ▶ **Décharge talonnière**
- ▶ **La tri-portance** pour garantir le confort et une meilleure répartition des pressions
- ▶ Large couverture de poids patient allant de 30 à **150kg**


Une ergonomie pensée pour prévenir les troubles musculo-squelettiques :

- ▶ Poids de 14 kg en fait un des matelas les plus légers du marché ce qui permet de réduire les risques de TMS
- ▶ Très simple à installer avec un design garantissant le bon positionnement du matelas sur le lit



NOVA FORM

| Praticité & Durabilité

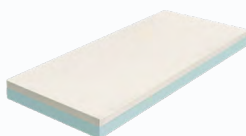

La praticité d'usage pour toutes les parties prenantes du parcours de soin :

- ▶ Matelas **Réversible tête/pied** pour simplifier l'installation
- ▶ Matelas **mono-vignette** pour une prescription médicale simple et rapide
- ▶ Couverture de poids patient large allant de 35 à **140kg**


Un produit conçu pour résister dans le temps :

- ▶ Base mousse de forte densité (37 kg/m³) pour un accueil généreux dans le temps
- ▶ Produit réversible pour permettre de limiter les appuis forts et prolongé, **prévenir le talonnement du matelas** et maximiser sa durée de vie.

Dimension de couchage 120 x 200 cm / 140 x 200 cm



NOVA FORM

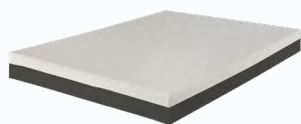

S'adapte à toutes les morphologies patients et disponible dans de nombreuses tailles

- ▶ Matelas **Réversible tête/pied** pour simplifier l'installation et optimiser la durée de vie
- ▶ Housse avec ouverture à glissière 3 côtés pour faciliter le nettoyage
- ▶ Disponible en largeurs hors standard notamment 120 x 200 cm et 140 x 200cm

Pour plus de renseignements merci de vous adresser au responsable commerciale de votre secteur.



winnCare.fr

WIN  CARE